

Před použitím:

1. Ověřte, zda je obal respirátoru nepoškozený.
2. Otevřete respirátor rozevřením nosní výztuhy.
3. Předvarujte nosní výztuhu nejlépe podle obrázku.
4. Přiložte respirátor k obličeji a přetáhněte upínací pásky přes hlavu.
5. Dotvarujte nosní výztuhu.
6. Prověřte těsnost respirátoru prudkým nadechnutím a zkontrolujte, zda vzduch neproudí mezi respirátorem a obličejem.

Určení:

1. maska označená „NR“ je určená pouze pro jedno použití po dobu směny, max. 8 hodin.
2. Tato maska pomáhá chránit před určitými znečišťujícími látkami ve formě částic, ale zcela nevylučuje vystavení se riziku nákazy nebo infekce.
3. Účinnost filtrace $\geq 94\%$.

Varování:

1. Nepoužívejte na bradku nebo jinak upravené vousy nebo za jiných podmínek, které brání dobrému utěsnění mezi obličejem a těsnící plochou respirátoru.
2. Tento výrobek nechrání v prostředí s nízkou koncentrací kyslíku ve vzduchu.
3. Nedoporučuje se praní, žehlení ani dezinfikování.
4. Nepoužívat ve výbušném prostředí.
5. Pokud je dýchání obtížné nebo se maska poškodí, zašpiní či zdeformuje, okamžitě ji vyměňte.

Skladování:

1. V originálním hermeticky uzavřeném obalu dbejte na skladovací teplotu -20 až $+40$ °C při max. vzdušné vlhkosti do 80%.
2. Skladujte v dobře větraném prostředí mimo přímý sluneční svit a zdroje sálavého tepla.

Výrobce:

Zhejiang Mashang Technology CO. Ltd.

366 Shanhai Awenue, Lingan Town, Cangant County, Wenzhou City 325800, ČLR

Dovozce:

Pure Equipment s.z.o., Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 lok. 16, 95-050 Konstantynów Łódzki, PL7312065378

Prodejce:

ROSA market s.r.o. Jožky Silného 2683/14, 767 01 Kroměříž, IČ: 25506641 DIČ: CZ25506641

Oznámený subjekt:

NB 2163 Universal Uygunluk Degerlendirme Hizmetleri ve Tic. A.S. Tatlisu Mah. Arif Ay Sk. No:16-3 Umraniye-Istanbul, Turecko

Tel: 05327559001

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/425.

Prohlášení o shodě naleznete na této [www: www.pramencz.cz](http://www.pramencz.cz)